



Flowmaster

Uroflow via database program:

1. Velg **MMS Flowmaster** program.
2. Klikk på **New pasient** eller velg en fra listen.
3. Tast inn pasient informasjonen og klikk på OK.
4. Klikk på **Start uroflow**.
5. Be pasienten urinere. Opptaket starter når flowmeteret registrerer urinen. For å starte opptaket med en gang klikk på **Start Urinering**.
6. Opptaket stopper 30sek. etter pasienten er ferdig. Det er mulig å trykke på **Stop og lagre**.
7. Pasientens informasjon og uroflow resultat blir lagret i databasen.
8. Klikk på **Print** for å printe ut uroflow resultatene.

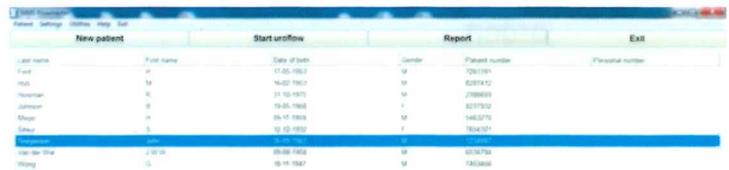

New patient							Start uroflow		Report		Exit	
Last name	First name	Date of birth	Gender	Patient number	Personal number							
Fred	M	17-05-1952	M	7261981								
Hus	M	16-02-1953	M	6297412								
Hovenden	K	21-10-1975	M	2789693								
Johnson	B	19-05-1968	F	8237592								
Olson	H	05-11-1959	M	5482070								
Olson	S	10-12-1952	F	7642197								

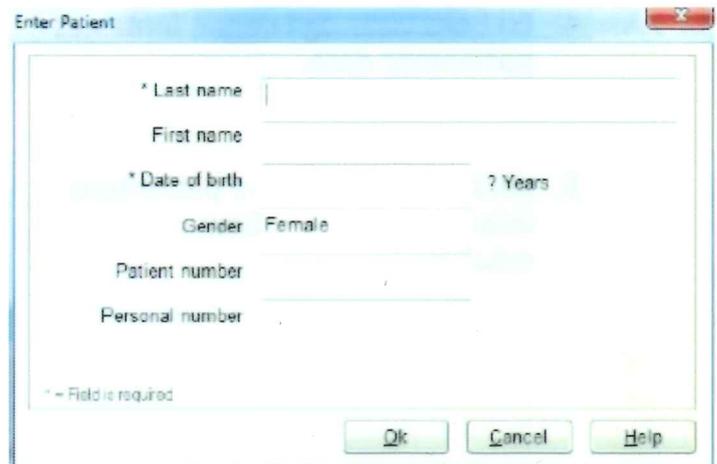

The 'Enter Patient' dialog box contains the following fields and options:

- * Last name:
- First name:
- * Date of birth: ? Years
- Gender: Female
- Patient number:
- Personal number:

* = Field is required

Buttons: Ok, Cancel, Help

Flowmaster




Uroflow uten database program:

1. Sjekk at flowmeter kommunikasjonen er i orden.
2. Be pasienten urinere. Opptaket starter når flowmeteret registrerer urinen.



3. Opptaket stopper 30 sek. etter pasienten er ferdig. Det er mulig å trykke på **Stop og lagre**.
4. En boks vises og i denne inntastes pasientens data.
5. Klikk på OK for å save pasientens informasjon og uroflow resultatene.

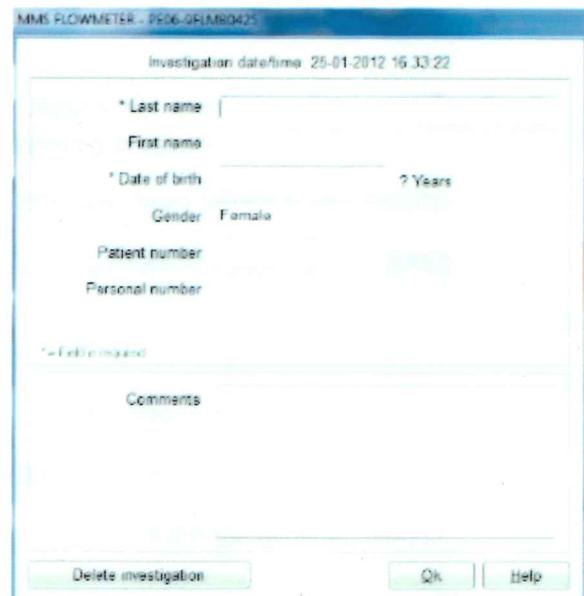

MMS FLOWMETER - 9506-SHMR0421

Investigation date/time: 25-01-2012 16:33:22

* Last name

First name

* Date of birth ? Years

Gender Female

Patient number

Personal number

* = Field is required

Comments

Delete investigation Ok Help