

**Kortfattet bruksanvisning for
OSCAR 2, modell 250
Accuwin Pro, Versjon 4**

Ambulant «24» timers blodtrykksmåler



Available with:



**Kortfattet bruksanvisning for
OSCAR 2, modell 250
Accuwin Pro, Versjon 4
Ambulant 24 timers blodtrykksmåler**

Oppstart

- 1 Start programmet «Accuwin Pro, versjon 4»
- 2 Koble til Oscar 2, modell 250, til overføringskabelen.
- 3 Klikk på ikonet  (Program)
- 4 Fyll inn pasientinfo: Minimum pasient ID, fornavn og etternavn.
- 5 Sjekk at settingene er som du ønsker (faneblad Standard og Advanced).
Hvis du er usikker, klikk på «Open Template», velg det «template» du har laget, f.eks. «blodtrykk»
Klikk «Open», og du har valgt «template»
Oppe i høyre hjørne står ditt «template» som f.eks. «blodtrykk»
- 6 Klikk på «**PROGRAM**».
- 7 Du får nå info om at det ligger data i apparatet.
Antar du har overført BT-måling tidligere (forrige pasient), du svarer da **YES** på spørsmålet og gamle data slettes.
- 8 Apparatet programmeres, dette tar ca. 10 sek.
- 9 Ta ut kabelen, slå av apparatet hvis du ikke skal koble til pasienten umiddelbart. Dette gjøres ved å hold den store blå on/off tasten inne i ca. 5 sekunder. (5 pip høres fra apparatet)
- 10 Koble til pasienten. Påse at du bruker riktig størrelse på mansjetten.
- 11 Trykk på **START/STOPP**  knappen på apparatet.
Resultatet av målingen vises på skjermen.
(Måleresultatene kan sees de første 15 minutter).
- 12 Hvis målingen/målingene (du kan ta flere målinger om ønskelig) er **OK**, send pasienten hjem.

Spesialtaster på apparatet:

Disse tastene aktiveres/deaktiveres i innstillingen av «vår template»

- 1 Det finnes to sorte taster på apparatet (normalt ikke aktivert):
 - a)  Denne trykkes inn for å angi når du legger deg og når du står opp.
 - b)  Denne tasten benyttes som en Event/hendelsesknapp.

Avspilling av ambulant blodtrykk:

- 1 Slå av apparatet når pasienten kommer tilbake. Dette gjøres ved å holde START/STOPP tasten inne i ca. 5 sek.
- 2 Start program «Accuwin Pro, ver. 4»
- 3 Koble kabelen til apparatet.
- 4 Klikk på ikonet 
- 5 Du får spørsmål om det er riktig person, hvis ja, klikke på **YES**.
Du kan nå fylle inn mer info vedrørende pasienten hvis ønskelig,
Trykk deretter på **OK**.
Hvis navn er feil eller ikke finnes, klikk på **NO**.
Velg navn fra Databasen, eller legg inn en ny pasient.
- 6 Klikk **OK**.
- 7 Dataene overføres.
- 8 Klikk på ikonet  Velg printer og skriv ut.

Programmering av «template»

- 1 Klikk på ikonet  (program)

De vanlige settingene er følgende:

Program monitor

Standard Advanced Template:

Patient Information

Patient ID *

Last Name * First Name Middle Name
 Select/ Create Patient

Measurement Schedule

Period	Hour	Brachial BP Interval	Central BP Interval
Awake time:	7:00	20 mins	None
Asleep time:	23:00	30 mins	None

Add special period Valgfritt (etter dine behov)




OFF ☐
ON ☒ Start study in 5 minutes
OFF ☐ Quality Control

Program Open template Save template Cancel Help

 = påkrevet

Obs! START «study in 5 minutes» skal være aktiv.

Program monitor

Standard Advanced Template:

Monitor Settings

Max Pressure (mmHg)

Intervals

120 80	Display Results	☐	Event marking	☐
	Manual readings	☒	Dose Response	☐
	include central BP	☐	Audible alerts	☐
	Day/night button	☐	Retry attempts	☒

PC time: 05.12.2018 10:02:00
 Monitor time: 05.12.2018 10:02:00
 Time zone difference: 0

Additional Patient Information

Study number	Site number	Note 1	Note 2

Program Open template Save template Cancel Help

 = anbefalt

Klikk deretter på SAVE TEMPLATE.

Skriv inn template navn f.eks. «blodtrykk», klikk SAVE.

(template navn kan max inneholde 12 tegn, og mellomrom aksepteres ikke)

Ditt template er nå lagret.

Hvis du vil se om du har valgt riktig template, klikk på «OPEN TEMPLATE».

Ditt valgte template vises med blå ramme.

Hvis det er riktig, klikk på CANCEL.

ALARM KODER

	Beskrivelse	Hva kan du gjøre?
1	Svak eller ikke oscillometrisk signal	Sjekk posisjon og stramming av mansjetten
2	Artifakt/Ekstrasystole ved måling	Stå stille ved måling (Sjekk om makstrykk er satt høyt nok)
3	Mer enn fire opp-pumpingsforsøk	Stå stille ved måling
4	Måling > 140 sek.	Sjekk slange/mansjett
5	Resultatet er utenfor arbeidsområde, BT: 25 – 260 mm/HG Hjertefrekvens: 40 til 200 slag/min.	Forsøk med ny måling ved å trykke på start/stopp knappen
6	Utslippshastigheten på luften i mansjetten er feil	Forsøk med ny måling ved å trykke på start/stopp knappen
85	Måling avsluttet	Sjekk slange/mansjett
86	Måling avsluttet	Trykk start/stop tasten
87	Måling avsluttet	Sjekk slange og mansjett
88	Måling avsluttet	Prøv igjen, trykk start/stop
89	Måling avsluttet	Sjekk at det ikke er knekk på slangen
90	Service nødvendig	Prøv å bytte batteri
91	Service nødvendig	Prøv start/stop
94	Lav batteri/alarm	Bytte batteri
97	Service nødvendig	Send apparatet til service
98	Service nødvendig	Retur for service
99	Service nødvendig	Må re-kalibreres av servicepersonell
108	Dose respons sequence start	Review full dose response sequence on Dose Response statistics tab
109	Dose respons sequence end	Review full dose response sequence on Dose Response statistics tab
110	Event markert av pasient	I rapporten velg kommentarer
111	Dag/natt modus bryter	Om ønskelig juster ABP datagrafikk til å stemme med tidene markert av pasienten
112	Natt/dag modus bryter	Om ønskelig juster ABP datagrafikk til å stemme med tidene markert av pasienten