

VEILEDNING FOR VISUELL INSPEKSJON FOR DISTAL ENDE

EVIS EXERA III DUODENOVideoskop OLYMPUS TJF-Q190V

ADVARSEL



Hvis det observeres uregelmessigheter, må du slutte å bruke endoskopet og kontakte Olympus.





Det anbefales å bruke et verktøy med 10x forstørrelse. *

- Inspiser følgende områder av den distale enden fra forskjellige retninger, med henvisning til illustrasjoner og bilder.
- Dette er en del av trinnene som er nødvendige for å inspisere den distale enden av innføringsdelen av TJF-Q190V på riktig måte, og inkluderer ikke alle inspeksjonstrinnene. Følg de detaljerte trinnene som er angitt i den nyeste BRUKSANVISNINGEN for TJF-Q190V.
- De følgende bildene er ment å vise eksempler på uregelmessigheter, og andre uregelmessigheter som ikke vises her kan forekomme.
- For detaljert inspeksjon anbefales en belysningsstyrke på 1000–2000 lux. *

* Se nasjonale lover og standarder, eller retningslinjer fra fagforeninger, f.eks. American National Standard ANSI/AAMI ST91:2021.


Visuell inspeksjon – Referansebilder

1 Pinsettelevator (hevet) og området rundt den

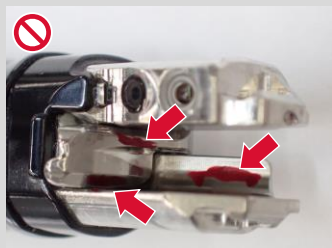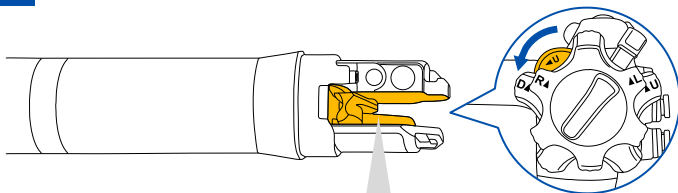



Fremmedmateriale som f.eks. rusk og væske

2 Pinsettelevator (senket) og området rundt den

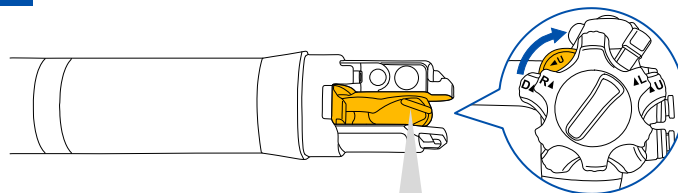


Fremmedmateriale som f.eks. rusk og væske

3 Distalring

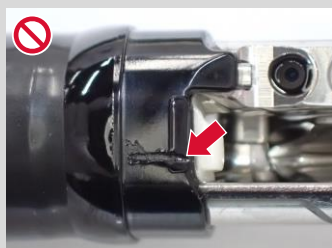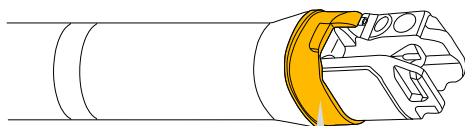

Sprekker, etc.

4 Hvit del nær instrumentkanalens utløp

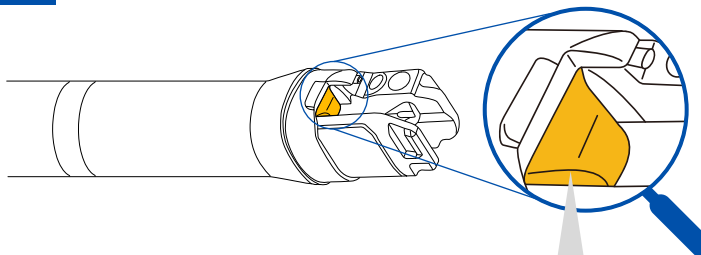

Fastklistrete fremmedlegemer, etc.

Fortsetter på baksiden



ADVARSEL

Hvis det observeres uregelmessigheter, må du slutte å bruke endoskopet og kontakte Olympus.

- Inspiser følgende områder av den distale enden fra forskjellige retninger, med henvisning til illustrasjoner og bilder.




Det anbefales å bruke et verktøy med 10x forstørrelse. *

* Se nasjonale lover og standarder, eller retningslinjer fra fagforeninger, f.eks. American National Standard ANSI/AAMI ST91:2021.



Visuell inspeksjon – Referansebilder

5 Riller og tetningslinje på den distale enden (høyre side)

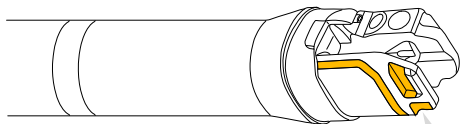

Vedheft av fremmedlegemer, manglende deler osv.




6 Riller og tetningslinjer på den distale enden (venstre bakside)

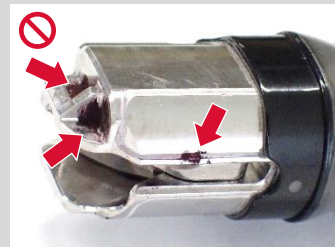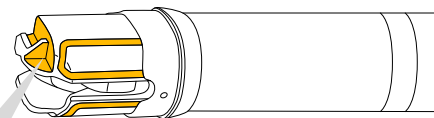

Vedheft av fremmedlegemer, manglende deler osv.




7 Luft/vanddyse

Se det fra forskjellige vinkler.

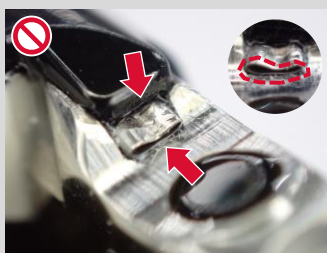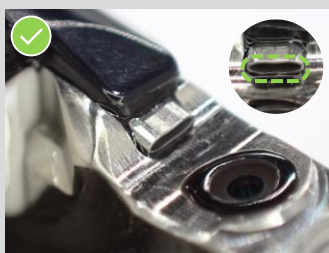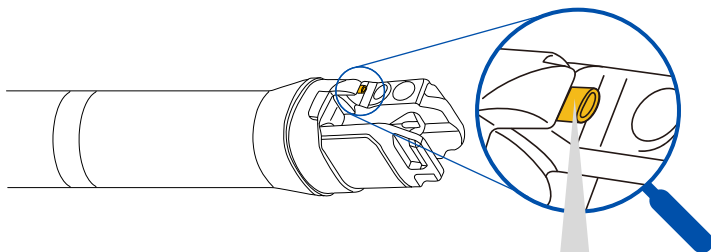

Bulker, hull rundt dysen, etc.

8 Objektivlinse og lyslederlinse

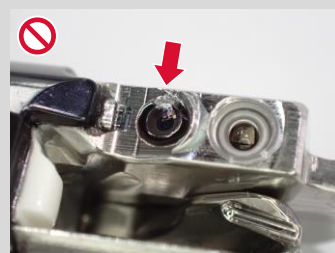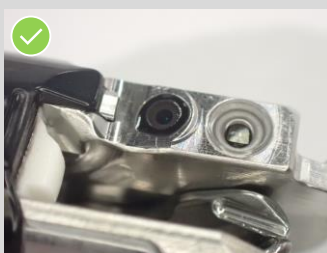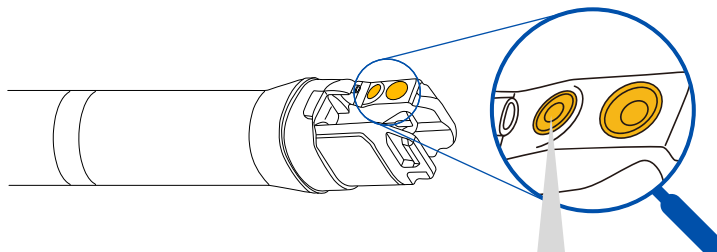

Sprekker, etc.

Se også forsiden



OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.

2951 Ishikawa-cho, Hachioji-shi, TOKYO 192-8507, JAPAN
Telefonnummer +81 42 642-2111, Faxnummer +81 42 646-2429



OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Wendenstraße 20, 20097 HAMBURG, GERMANY
Postfach 10 49 08, 20034 HAMBURG, GERMANY
Telefonnummer +49 40 23773-0

— Forhandler —

OLYMPUS NORGE AS

Drengsrudbekken 12, 1383 ASKER, NORWAY
Postboks 143, 1371 ASKER, NORWAY
Telefonnummer +47 23 00 50 50