

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	Schiller døgn-EKG registrering/avlesning		
Godkjent av: Åse Therese Nordstrønen	Faglig ansvarlig: Åse-Randi Berentsen/Trude Daleng	Skrevet av: Åse-Randi Berentsen	Gyldig fra: 12.09.2024 Revider innen: 12.09.2026

Opplæring / dokumentasjon av kunnskapsnivå ang. elektromedisinsk utstyr for sykepleiere ved medisinsk poliklinikk.

• Kjenne til rengjøringsprosedyre for utstyr og tilbehør / koblinger. Veskene som vanligvis benyttes på Schiller MT 101 og snoren rundt halsen til medilog AR, leveres til skyllerom og vaskes i instrumentmaskinen. Medilog AR-apparatene , bæreveske og kabler kan rengjøres med sprit.
• Kjenne til at med.teknisk avdeling er ansvarlig for vedlikehold og kan kontaktes når feil / mangler oppstår.
• Slå på sentralen og velg DARWIN 2 program. Sett inn nytt batteri i Holteren.
• Koble Holter til pc via USB-kabel. Velg enten MT101 eller medilog AR. Skrive inn pasientdata.
• Koble ledninger til pasienten korrekt og starte opptak. Ved 48 eller 72 t registrering, informer pasienten om skifte av batteri på MT 101, ikke nødvendig på medilog- AR-professional.
• Vite at man slår av apparatet MT101 ved å ta ut batteriet, ikke nødvendig på medilog AR. For medilog AR er valgfritt om batteriene står i apparatet når apparatet settes til lading.
• Kjenne de ulike ikoner og bruken av dem. Last ned EKG via USB-kabel eller minnebrikke via nedlastnings og analyse-ikon. Vite at hvis pasienten har pacemaker så kan dette endres etter at pasienten kommer tilbake og analysen gjennomføres. Kunne redigere EKG.
• Overføre til DIPS det redigerte hjerteregistreringen
•

1 Referanser

2 Vedlegg