


1

Slå på BladderScan® BVI 9400 ved å trykke på på/av knappen

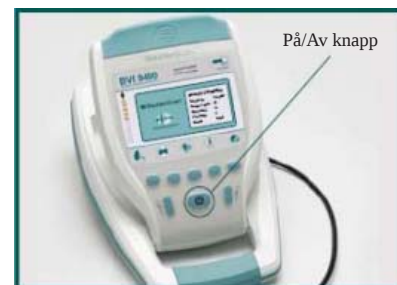

2

Velg innstilling

Bladderscan BVI-9400 er laget for å skanne på tre forskjellige måter, tilpasset pasienten. Velg riktig metode for å få et så nøyaktig skan som mulig. Trykk på knappen flere ganger inntil riktig innstilling er synlig.



Skan mann, eller kvinne som har hatt hysterectomi



Skan kvinne som ikke har hatt hysterectomi



Skan barn som er mindre enn 122 cm og veier under 27 kg.



3

Påfør ultralydgel

La pasienten ligge godt avslappet på ryggen, gjerne med overkroppen litt hevet. Lokaliser symfysen. Påfør en passende mengde ultralydgel langs midtlinjen nederst på abdomen hos pasienten, ca 2-3 cm over symfysen.



4

Sikt på blæren

Plasser sensorhodet på den påførte gelen pekende mot forventet blæreposisjon, sikt ned mot pasientens haleben. Når du står på pasientens høyre side skal håndtaket på skanneren være mot deg.



5

Trykk på SKANNE knappen

Trykk på skanne knappen som sitter på undersiden av proben. Når skanningen pågår, vil blæren gradvis komme til syne på skjermen. Når du hører et pip er skanningen fullført. Hold proben helt i ro under skanningen.



www.verathon.com <https://my.scanpoint.com>

For more information, call +31(0)306870570 in the Netherlands or contact your local Verathon Medical® representative.

BladderScan®, ScanPoint®, Verathon®, and Verathon Medical® are registered trademarks of Verathon Inc. in the US and other countries. Copyright © 2008 by Verathon Inc. All rights reserved.

6

Bekreftelse av skanningen

Skanningen er godkjent når alle 8 piler blinker i displayet på proben. Blæren vil også være synlig i sentrum av kryssiktet som sees i displayet på selve maskinen. Ingen piler vil være synlige i displayet. Det er en godkjent skanning og ikke behov for å skanne på nytt.

6a

Når må du skanne på nytt

Dersom skanningen ikke er nøyaktig, vil det komme en pil til syne på den lille skjermen på proben. Pilen vil peke i den retningen proben skal beveges. Dersom pila er i ro betyr det at du er litt ute av stilling. Dersom pila blinker, er du mye ute av stilling. På displayet på selve apparatet vil du se at kryssiktet ikke er i senter av blæren. En pil vil også her være synlig som viser hvilken vei du må flytte proben.

6b

Skanne på nytt

Legg merke til at den lille prikken (kl. 6) under kryssiktet på displayet skal markere pasientens føtter. Posisjonen "kl. 12" representerer pasientens hode og den øvre venstre del (kl. 9-12) representerer pasientens høyre skulder. Dette kan være nyttig å tenke på for enklere å få med hele blæren når man skanner.

6c

Symfyssen

Du kan også oppleve at symfyssen kommer til syne i kryssiktet når du har skannet. Da kan det være greit å skanne på nytt slik at du er sikker på at ikke benet skjuler noe av blæren. Dette til tross for at kryssiktet er midt i blæren.

7

Lagre, se på og printe ut skanne resultater

For å lagre en skanning må du tale inn pasientinformasjonen.

Trykk på og slipp opp "TAL INN" knappen på displayet. Når du ser at "TAL INN" knappen endres til "STOPP" knapp, tal inn pasientinformasjonen i mikrofonen på proben.

Trykk på "STOPP" knappen. Når timeglasset forsvinner, trykk på "LYTT" knappen for å sjekke informasjonen.

For å vurdere bildene av skanningen, trykk på "REVIEW" knappen (du må først ha lagret skanningen for å kunne se bildene).





Trykk "PRINT" knappen for å printe ut resultatet.

Trykk "HJEM" knappen for å skanne på nytt.

8

Avslutt undersøkelsen

Når du er fornøyd med din skanning, tørk bort ultralydgel fra pasienten og proben

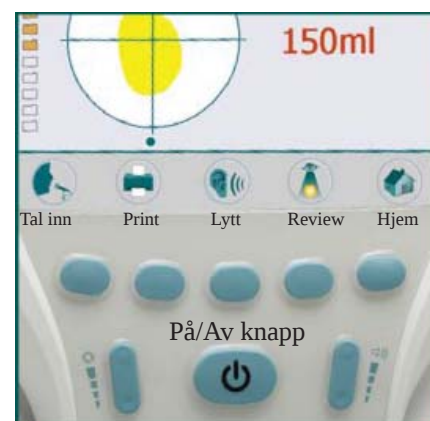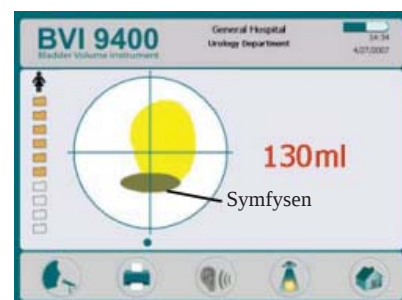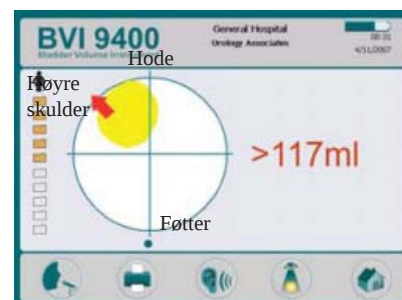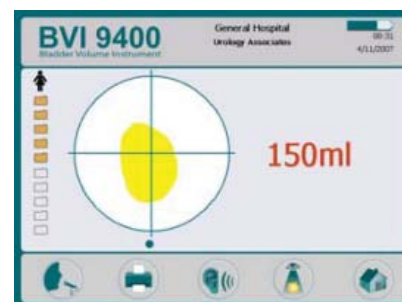

Ved ønske om ytterligere informasjon eller spørsmål om bruken av BladderScan, vennligst kontakt: