

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	Opplærings skjema: Sykehusseng PURO		
Godkjent av: Åse Therese Nordstrønen	Faglig ansvarlig: Trine Espeland	Skrevet av: Medisin 3	Gyldig fra: 17.02.2026 Revider innen: 17.02.2028

1 Kunnskapskrav

1	Les Brukermanual
2	Kjenne til rengjøringsprosedyre for sengen og tilbehør/koblinger: - Sengen vaskes av eget personale i sengesentralen - Egne rutiner ved smitte
3	Kjenne til hvem som er ansvarlig for vedlikehold, og hva du gjør når feil og mangler oppstår: - Teknisk avdeling er ansvarlig for vedlikehold/reparasjon. - Feil og mangler meldes i Plania. Ressurs: VVS – Mekanisk. - Ved feil og mangler: Ta ut stikkontakt, ta sengen ut av bruk, merk «I USTAND».
4	Kjenne til bruken av fjernkontrollen og de ulike sengejusteringene, se Brukermanual
5	Kjenne til bruken av ekstra kontrollpanel i underskuffen i sengens fotende. - Hvordan låse/låse opp funksjoner for fjernkontrollen. - Hvordan legge ned hjertebrettet (CPR funksjon). - Max. Belastning: 15 kg.
6	Kjenne til sengens begrensninger uten tilkoblet strøm - 10 sengejusteringer opp/ned x 230 kg (flere ved lettere pasienter)
7	Kjenne til manuelle funksjoner: - Låse hjul - CPR hendel (oransje) – legger ned hjertebrettet. - Legg-/benleie («ortoped-funksjon»).
8	Kjenne til aktivisering av funksjonen sjokkleie – CPR (oransje magnetutløsere)
9	Kjenne til bruken av MultiFlex+ sidegrind
10	Kjenne til bruken av sengeforlenger.
11	Kjenne til hvordan man fjerner hode – og fotbrett
12	Kjenne til bruk av tilbehør og festemuligheter for dette
13	Kjenne til sikkerhetsaspekt: - Fare for elektrisk støt ved skadde kabler - Kontinuerlige operasjoner/justeringer må ikke overstige 2 minutter. - Ikke sitt på hevede deler av hjertebrett eller fotbrett

2 Kilder

[D07829 Brukermanual PURO Sykehusseng](#)

[D07877 Bruksanvisning MultiFlex + sidegrind til PURO pasientseng](#)

Produktansvarlig i ETAC Norge A/S