

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	Opplæringsskjema: Defibrillator LifePak CR2 (AED)		
Godkjent av: Åse Therese Nordstrønen	Faglig ansvarlig: 	Skrevet av: Ingrid Bjørkhaug	Gyldig fra: 05.03.2024 Revider innen: 05.03.2026

Kunnskapskrav

1	Kjenner til melderutiner ved avvik, feil og reparasjon på MTU.
2	Vite at bruksanvisning ligger sammen med apparatet
3	Kjenne til lagerplass for utstyr og tilbehør/koblinger
4	Kjenne til rengjøringsprosedyre for utstyr og tilbehør/koblinger: Såpe/vann, Kvaternære ammoniumforbindelser, Isopropanol, Peroksid løsninger
5	Kjenne til hvem som er ansvarlig for vedlikehold og hva du gjør når feil/mangler oppstår Medisinsk teknisk avdeling
6	Skal kunne følgende, men kan finne svar i brukermanualen:
7	Sikkerhetsrutiner ved bruk av defibrillator
8	Kunne åpne lokket på LIFEPAK CR2 – dette slår på defibrillatoren
9	Kunne feste pads på pasienten
10	Kunne velge Voksen/barnemodus
11	Vite at padsene til LIFEPAK CR2 kan brukes på andre LIFEPAK apparater
12	Vite at man kan utføre hjerte/lungeredning under analyse av hjerterytme
13	Vite at LIFEPAK CR2 har cprCOACH Feedback Technology som gir veiledning i hjerte-/lungeredning
14	Vite at LIFEPAK CR2 har ClearVoice Technology som øker volumet etter omgivende støynivå
15	Vite at LIFEPAK CR2 har cprINSIGHT analyseteknologi som analyserer pasientens hjerterytme mens HLR blir utført og reduserer pauser i brystkompresjoner
16	Vite at når beredskapsindikatoren blinker hvert 6.sek indikerer det at LIFEPAK CR2 er klar til bruk
17	Vite hvordan en bytter pads på LIFEPAK CR2

1 Vedlegg

[D07876 Brukerveiledning; Lifepak CR2 defibrillator](#)

[D09052 Påfylling og kontroll av hjertestanstralle etter en akutsituasjon](#)