

KARL STORZ KORTMANUAL C-MAC

OBS! erstatter ikke brukermanualen som bør leses i sin helhet før bruk og rengjøring.

Tilkobling
av skop

Lade-
kontakt

Reset

SD-
minnekort

Status
minne

Tilkobling
av skop

HDMI
port

USB
port

Grønn lampe blinker =
Stand-by modus

Ett trykk = På

Oransje lampe = lader

Betjeningsknapper

Innstilling/ verktøy

Funksjons-
symboler

KARL STORZ KORTMANUAL C-MAC

Trykk

Handling og videre handlingsmeny:



Video opptak til SD minnekort (kan overføres til USB minne senere – se forklaring lenger ned)



Stopp video opptak



Ta et enkelt bilde



Bytte mellom rigid / fleksibel intubasjon/skopering



Hopp til neste skjermbilde (i andre skjermbilder: Tilbake til startmenyen)



Velg video, deretter: Scroll opp Scroll ned Spill video
 Slett video (hold knappen inne) Stopp video Pause videoavspilling



Velg bilder, deretter: Scroll opp Scroll ned Slett bilde (hold knappen inne)



Avanserte innstillinger: Hvitbalanse Flytte data fra SD til USB minne
 Lysstyrke Kontrast Fargesammensetning Fargemetning



Rengjøring: Enheten kan overflate desinfiseres med midler beskrevet i:
Chemicals for processing telescopes, fiberscopes and endoscopic instruments
NB! Ikke benytt alkoholholdige midler på skjermen!