

HVORDAN SJEKKE SUG?

- Kontroll av medisinsk sug 1 gang i måneden -

- 1) Slå på suget
- 2) Fest engangs oppsamlingspose med grønt lokk opp i hardplastbeholder.
- 3) Sug justeres ved å trykke inn og skru på innstillingshjulet
- 4) Sjekk at du kan få et trykk på 80 kPa ved kontroll
(Lag trykk ved å lage knekk på slangen eller holde på inntaket til oppsamlingsposen – hvit tapp).
- 5) Trykk ved sug i øvre luftveier: 20-25 kPa/150-200 mmhg.
- 6) Bakeriet og virus filter mellom sug og hardplastbeholder:
Filteret og gjennomsiktig slangen bør byttes når fargen ikke er helt hvit lenger.
- 7) Sug skal rengjøres og gøres klart til bruk når det plasseres tilbake på lagersted.

Sug er kontrollert og klargjort:

Måned år:	Signatur	Kommentar
Januar		
Februar		
Mars		
April		
Mai		
Juni		
Juli		
August		
September		
Oktober		

November		
Dezember		