

Brukermanual til IntelliVue MX450

1. Slå monitoren på

Trykk på av/på-knappen nederst til venstre på monitoren, og hold den inne i 1 sekund for å slå den på. Det tennes en grønn lampe ved siden av bryteren, og skjermen lyses opp.

2. Hurtiginnskriving

Velg hurtigtasten «*Hurtig-innskr.*» og angi fødselsnummer med en strekkodeleseren. Bekreft deretter at det er riktig pasient som er skrevet inn.

3. Kople pasienten til monitoren

Klargjør huden, og fest elektrodene på pasienten; Kople til 3-punkts EKG for å måle **respirasjonsfrekvens**. Se kart på ledningen for plassering. Du vil da få automatisk respirasjonsfrekvens (RR).

Når man teller respirasjonsfrekvensen manuelt, trykker man på *RR-verdien* på skjerm for å føre inn.

Velg riktig størrelse på **NBP**-mansjetten, og fest den på pasienten;

Velg **Start/stopp** eller trykk på NBP-verdi på skjerm for å starte NBP-målinger.

Kople **SpO2**- sensoren på pasienten for å få SpO2 og puls. Ikke sett SpO2- sensoren på samme arm som NBP-mansjetten.

Ta **temp** manuelt og trykk på tempverdien på skjerm for å føre inn.

Velg **LOC** (bevissthetsnivå).

Velg om pas. har tilført **O2** eller ikke.

Det vil nå dukke opp en **NEWS-score** til venstre i bildet, samt en respons under målingene.

4. Avslutte

Når man er ferdig med å ta målinger av pas. velger man «*Lagre verdier*». Velg så «*Avslutt kasus*» for å sette monitoren i **standby**.

12-avlednings EKG

Bytt koblingen til 3-avlednings EKG med koblingen til 12-avlednings EKG. Klargjør huden, fest elektrodene på pas. og koble til ledningene. Se kart på ledning dersom du er usikker på plassering. Trykk på hurtigtasten «*Registr. 12-avldn*». Da får du opp en EKG-kurve. Når man er fornøyd med EKG, velg hurtigtasten «*Registrer kurver*», deretter «*Lagre og send*». Vent ca. 8 sek. og trykk deretter «*Eksporter*» to ganger. Man vil da få opp en melding om eksporten var vellykket eller ikke.

Greit å vite:

Dersom man ønsker å komme tilbake til **start**, velger man hurtigtasten «*Standardbilde*».

Rengjøring av skjerm – trykk på tasten «*standardbilde*» og hold inne i 3 sekunder for å **deaktivere berøringsfunksjonen**. Trykk og hold inne i 3 sekunder for å aktivere berøringsskjermen.

Reagere på alarmer

Det finnes tre mulige alarmnivåer som monitoren vil angi slik det er beskrevet nedenfor:

- **Alarmer med lav prioritet:** blå alarmlampe, blå alarmmelding på skjermbildet, lydsignal for alarm med lav prioritet. Eksempler: NBP avbrutt
- **Gule alarmer:** gul alarmlampe, gul alarmmelding på skjermen, lydsignal for alarm med middels prioritet. Eksempler: **SpO2 94 <96
- **Røde alarmer:** rød alarmlampe, røde alarmmeldinger på skjermen, lydsignal for alarm med høy prioritet. Eksempler: ***Asystole

Hvis du vil **kvittere for en alarm**, velger du tasten «*Kvitter alarm*» nederst til venstre i skjermbildet. Alarmen kvitteres, og alarmlyd og alarmlamper slås av. Velg tasten «*Alarmer midl. Av*» hvis du ønsker å **slå av alle alarmene** på monitoren i 2 minutter.

X2 (hjernen til monitoren) kan fjernes fra monitoren ved transport når det er behov for overvåking av pasient, men skal bare brukes til dette dersom sykepleier er med. X2 skal **alltid** være med tilbake til moderpost. Husk at monitoren ikke kan brukes dersom X2 er frakoblet.

Overvåking av NBP:

Trykk over NBP du kan velge Tidsintervall fra 1min opp til 24time.

Dersom **protokoll er av**, trykk «*profiler*» og deretter «*News*» og «*bekreft*».

Ved følgende feil:

- WIFI er nede
- Eksport av 12-avlednings EKG ikke vellykket.
- Pasientnavn kommer ikke opp.
- Eller andre feil.

Kontakt medisinsk teknisk avd. på tlf: 55 97 93 34/3/5