

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	Olympus tørkeskap til endoskop		
Godkjent av: Åse Therese Nordstrønen	Faglig ansvarlig: Elisabet Askeland Ystebø/Laila Johanne Johnsen	Skrevet av: Rania Wassouf, Elisabet Askeland Ystebø	Gyldig fra: 16.02.2024 Revider innen: 16.02.2026

Merknad til denne versjonen:

Kort brukesanvisning til tørkeskap : skanning med kort

1 Hensikt og målgruppe

Assisterter og sykepleiere ansatt på medisinsk poliklinikk

2 Definisjoner

Hvordan henge inn og ta ut endoskop av tørkeskap

3 Arbeidsbeskrivelse

Bruksanvisning til hvordan henge inn endosko:

- Scanne kortet
- Åpne dører til tørkeskap
- Brikke til endoskop
- Endoskop henges inn
- Lukke døren

Hente ut et endoskop fra tørkeskap:

- Scanne kort
- Åpne dør
- Ta ut endoskop

4 Eksterne referanser

Olumpus

5 Lenker til relaterte dokumenter i EK

[Rengjøringsprosedyrer for: Fleksible cystoskop, gastroskop, colonoskop, bronkoskop, TØE-skop. \(haraldsplass.no\)](#)