

 Haraldsplass Diakonale Sykehus	NEWS2/datafangst fra monitor til Meona		
Godkjent av: Petter Thornam	Faglig ansvarlig: Ida Berglund & Rania Wassouf	Skrevet av: Ida Berglund & Rania Wassouf	Gyldig fra: 18.11.2025 Revider innen: 18.11.2026

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
1 Hensikt og omfang	1
2 Målgruppe	1
3 Arbeidsbeskrivelse	1
3.1 Viktige aspekter	1
3.2 Gjennomføring av NEWS2 skala 1	2
3.3 Gjennomføring av NEWS2 skala 2 (legeordinasjon)	3
3.4 Gjennomføring av måling av ett enkelt eller flere parametere uten NEWS2 score	4
3.5 Visning i Meona	4
3.6 Redigering/sletting i Meona	4
4 Feilsøking	5
4.1 Det kommer ikke data inn i Meona	5
4.2 «Hurtig innskriv» og «avslutt kasus» er grå	5
5 Kjente utfordringer/feil	6

1 Hensikt og omfang

Sikre korrekt bruk av datafangst av NEWS2 fra monitor til Meona.

2 Målgruppe

Alt pleiepersonell som utfører NEWS2 målinger med datafangst til Meona på Haraldsplass.

3 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Viktige aspekter

- O2 tilførsel må ordineres første gang i Meona via tiltak/us. Dersom O2 tilførsel endres må dette manuelt registreres i Meona ved å trykke «vis/rediger» på News verdien. Da vil man automatisk få opp forslag om ny tilførsel man la inn i monitor. Trykk «ok».
- Bruker er ansvarlig for å verifisere at målinger kommer inn i Meona.

3.2 Gjennomføring av NEWS2 skala 1

1. Trykk på «Hurtig innskriv» på menylinjen 
2. Skann pasientens armbånd og trykk «bekreft» slik at f.nr kommer inn øverst i monitor
3. Mål blodtrykk, SpO2 og puls. Manuelt før inn RR, temperatur, bevissthet, O2 tilførsel ja/nei og evt O2 flow i NEWS2 vinduet




4. Trykk «lagre verdier» på menylinjen for å sende scoren til Meona. 

Påse at du får opp nytt vindu der man får oversikt over verdiene man har sendt



5. Trykk «avslutt kasus» for å skrive ut pasienten. Monitor vil da gå automatisk i standby modus 
6. Gå videre til neste pasient.
7. Trykk på skjermen for å vekke monitor og start på punkt 1 igjen.
8. Når du er ferdig å måle alle pasientene, trykk «avslutt kasus» og sett monitoren til ladning i standby modus.

1. Trykk på skjermen for å vekke monitor
2. Trykk på profiler:

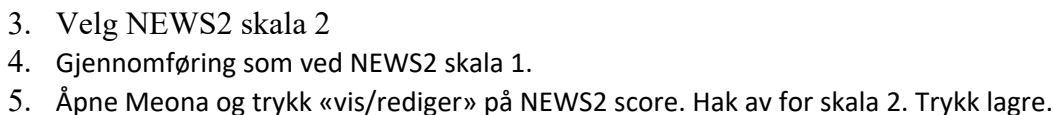Dok id: D10773

3.4 Gjennomføring av måling av ett enkelt eller flere parametere uten NEWS2 score

1. Trykk på «Hurtig innskriv» på menylinjen



2. Skann pasientens armbånd og trykk «bekreft» slik at f.nr kommer inn øverst i monitor
3. Mål ett eller flere parametere (SpO2 og puls, blodtrykk, RR, Temperatur).
4. Trykk «lagre verdier» på menylinjen for å sende til Meona.



Påse at du får opp nytt vindu der man får oversikt over verdiene man har sendt


5. Trykk «avslutt kasus» for å skrive ut pasienten. Monitor vil da gå automatisk i standby modus



6. Sett monitoren til ladning i standby modus.

3.5 Visning i Meona

NEWS2 registreringer kommer samlet inn i kurven og en kan se de enkelte målingene i grafen, i ulike rader og i fane Overvåkningstabell i Meona.

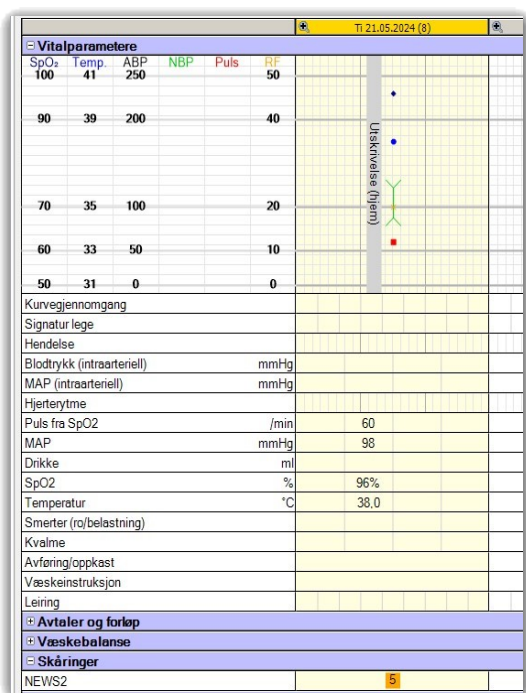

3.6 Redigering/sletting i Meona

Ved behov for å redigere NEWS2 som er sendt fra monitor:

1. Logg på Meona
2. Høyreklikk på aktuell NEWS2 score og velg *Vis/rediger verdi*.
3. Utføre endringen og klikk OK. Endringen blir oppdatert i kurven.

5
Ny verdi...
Vis/rediger verdi...
Slett verdi
Historikk...
Forløpsdiagram...
Vis tooltip
Lukk meny


Ved behov for å slette NEWS2 som er sendt fra monitor:

1. Logg på Meona
2. Høyreklikk på aktuell NEWS2 score og velge *Slett verdi*.
3. Deretter må også hver enkelt måling (blodtrykk, SpO2, puls og RR) slettes ved å høyreklikke i graf eller overvåkningstabell, velg så «slett»


4 Feilsøking

4.1 Det kommer ikke data inn i Meona


1. Kontroller at du har skannet pasientarmbånd og at navn eller f.nr vises øverst på monitoren
2. Kontroller at du har sendt til riktig Meona kurve
3. Sjekk symbol i monitor øverst til venstre at du har WIFI tilkobling

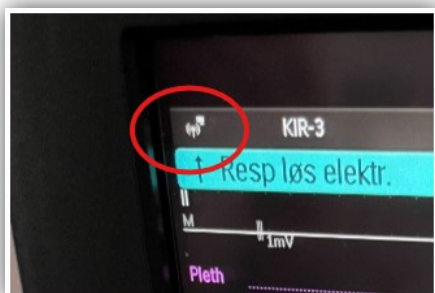

4.2 «Hurtig innskriv» og «avslutt kasus» er grå

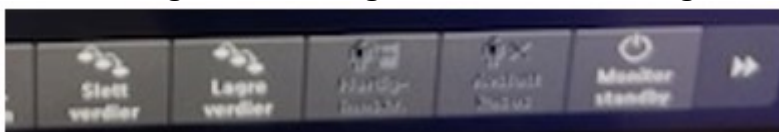

1. Trykk på «Pasient?????» som er merket rødt øverst på monitor i midten
2. Trykk så «ny pasient» nederst
3. Trykk på «standard bilde»

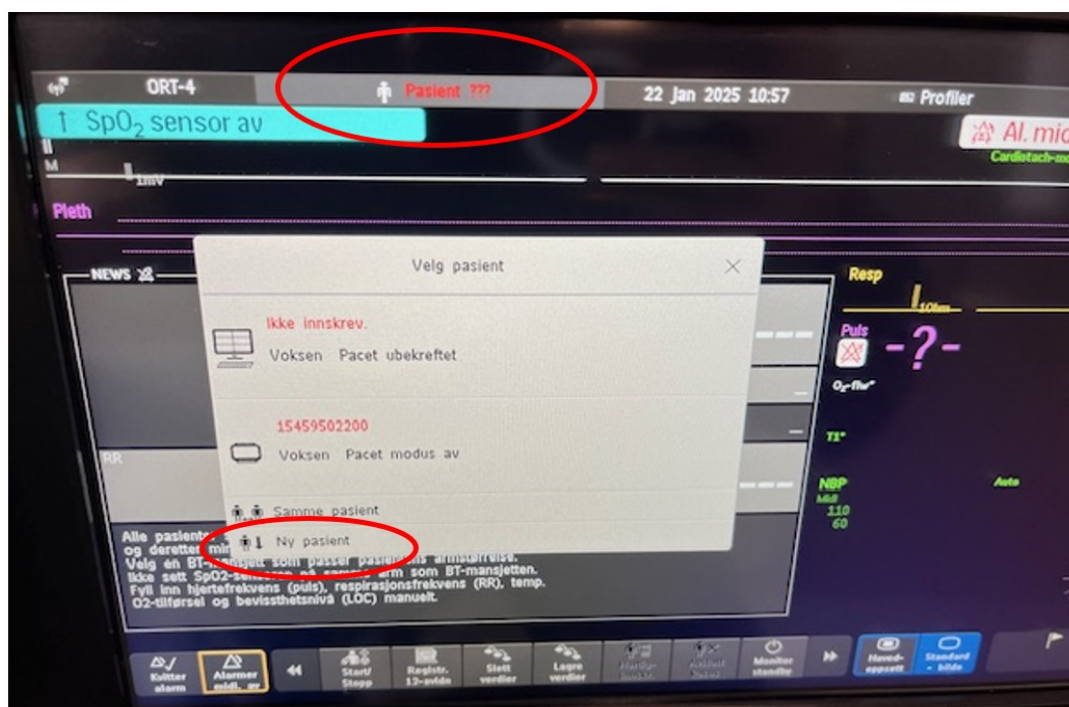

Ved fortsatt feil ta kontakt med Medisinsk teknisk avdeling på tlf 46808539/41602884

5 Kjente utfordringer/feil

Overvåkningstabell viser duplisert blodtrykk ved NEWS2 scoring.

Regional prosedyre i HV: [Mal for fellesrutine i Felles EPJ løsning](#)